



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
OKSİJEN TÜPÜ  
HAFTALIK KONTROL VE BAKIM FORMU



Kodu:DTY.FR.02.9

Yayın Tarihi:01.11.2018

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa no/Sayfa Sayısı:1/1

**YAPILACAK KONTROL VE BAKIM**

1. Oksijen tüpleri haftalık olarak kontrol edilir.
2. Oksijen tüpünün manometresi kontrol edilir. Vana hafifçe açılır, manometrenin ibresinin yükselmesi gerekir.
3. Vana kapatılır, vana kapalı iken ibrenin sıfıra düşmemesi gerekir. Eğer sıfıra düşmüş ise tüp boştur veya kaçak vardır.
4. Vana açıldığında gaz basınçla dışarı çıkmışsa tüp vanasında kaçak vardır. Tüp kullanılmamalı firmaya kontrole gönderilmelidir.
5. Su haznesi kontrolü; su alt ve üst sınır arasında olmalıdır.
6. Doluluk (Bar) Kontrolü; vana hafifçe açılır manometrenin ibresinin yükselmesi gerekir, ibrenin durduğu sayı bar göstergesidir.
7. Oksijen tüpünün kapakları takılı olmalıdır.
8. Oksijen tüpleri ateşten ve sıcaktan uzak tutulmalıdır.
9. Oksijen tüpleri dik konumda muhafaza edilmelidir.

TARİH:	Kontrol ve Bakımı Yapılan Oksijen Tüpü Sayısı	Sorun Var/Yok	Sorun Var İse Yapılan İşlem	Teknisyen Adı Soyadı	İmza

HAZIRLAYAN:  
Teknik Hizmetler Sorumlusu

KONTROL EDEN:  
Kalite Direktörü

ONAYLAYAN:  
Dekan