



**KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ**  
**DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**RÖNTGEN CİHAZLARI**  
**TEMİZLİK TALİMATI**



Kodu: DOH.TL.02.09 Yayın Tarihi: 02.01.2019 Revizyon Tarihi: Revizyon No: Sayfa No/Sayfa sayısı:1/1

**1. AMAÇ:** Röntgen biriminin ve kullanılan cihazların temizliği ve hasta güvenliğinin sağlanmasıdır.

**2. KAPSAM:** Fakültemizdeki röntgen cihazlarını kapsar.

**3. SORUMLULAR:** Temizlik işlemleri temizlik personeli tarafından yapılır. Denetiminden Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sorumludur.

**4. FAALİYET AKIŞI:**

- Birim içerisinde bulunan evsel atık, varsa tıbbi atık, atık prosedürüne uygun bir şekilde toplanır.
- Tüm yer yüzeyleri, mop yardımıyla, temizden kirliye, yukarıdan aşağıya, içeriden dışarıya doğru uygulanarak temizlik sağlanır.
- Panoramik radyografilerin ısırtma çubuğu her hastaya kullanılmadan önce dezenfektan sprey ile 1-2 dakika bekletilerek dezenfekte edilmeli, üzerine tek kullanımlık koruyucu poşet geçirilmelidir.
- Periapikal, panoramik ve RVG cihazların kazara hastaya temas eden bölümleri (cihazın kolları tüpü vs. gibi.) her temas sonrası, kolları her saat başı görevli personel ve röntgen çalışanları tarafından hızlı yüzey dezenfektanı sıkılarak silinir.
- Ayrıca hastanın oturduğu ünit kolları ve tetiyer de aynı şekilde dezenfekte edilir.

**Hazırlayan:**  
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

**Kontrol eden:**  
Kalite Direktörü

**Onaylayan:**  
Dekan